

# BLACKROLL® NEEDLEROLLER

- Stimulation der oberflächlichen Faszien
- Die prickelnde, durchblutungsfördernde Wirkung ist sofort spürbar
- Die Schmerzempfindlichkeit wird reduziert
- Kann die Kollagen- und Elastinproduktion regulieren

Die Stimulation der oberflächlichen Faszien mit dem BLACKROLL® NEEDLEROLLER hat vielfältige Effekte. Die Nervenendigungen in der Haut und den oberen Faszien-schichten werden stimuliert. Bei chronischen Schmerzen kann das die Schmerzkreisläufe durchbrechen; bei anschließenden therapeutischen Behandlungen wird das Gewebe optimal vorbereitet. Die prickelnde, durchblutungsfördernde Wirkung ist sofort spürbar, die Schmerzempfindlichkeit wird schon nach kurzer Anwendung deutlich reduziert. In Kombination mit der Behandlung tiefer liegender Gewebeschichten kann der BLACKROLL® NEEDLEROLLER die Kollagen- und Elastinproduktion regulieren.

## Anwendungsgebiete des BLACKROLL® NEEDLEROLLER

Der Druck des BLACKROLL® NEEDLEROLLERS lässt sich sehr gut dosieren. Rolle auf der Haut vor und zurück und stimulare so die freien Nervenenden in der Haut. Der NEEDLEROLLER ist besonders gut geeignet, um die Reflex- und Akupunktur-zonen anzuregen. Er ist zudem ideal für die Vorbereitung auf die Arbeit mit der [BLACKROLL® STANDARD](#), der [BLACKROLL® MINI](#), dem [BLACKROLL® DUOBALL](#) und dem [BLACKROLL® RELEAZER](#), kann aber auch nach dem Rollout verwendet werden.

### GRÖSSE & GEWICHT

- 26 cm x 9 cm x 6,5 cm, 180 g

### LIEFERUMFANG

- 1 x BLACKROLL® NEEDLEROLLER
- 1 x BLACKROLL® NEEDLEROLLER Manual

### WARNHINWEISE UND GEGENANZEIGE

Reduziere den Druck oder lege eine Anwendungspause ein, sollten sich Rötungen und Hautirritationen zeigen. Wenn dir die Stimulation anfangs zu intensiv erscheint, kannst du diese durch ein dünnes Tuch zwischen dem Roller und der Haut abschwächen. Konsultiere vor der Nutzung des BLACKROLL® NEEDLEROLLERS deinen Arzt, solltest du unter folgenden Beschwerden leiden:

- Akute Infektionskrankheiten
- Akute oder fiebrige Phasen chronischer Krankheiten

- Akute Traumata bzw. Erkrankungen (z.B. Knochenbrüche, Blutgerinnsel, Thrombosen)
- Herzkreislauferkrankungen
- Krampfadern
- Nach Operationen, bei Wunden, Verbrennungen und Erfrierungen
- Bei Hautkrankheiten
- Bei Einnahme von gerinnungshemmenden („blutverdünnenden“) Medikamenten

*Solltest du dir bezüglich anderer Erkrankungen oder im Falle einer Schwangerschaft unsicher sein, halte im Vorfeld unbedingt Rücksprache mit deinem Arzt oder Therapeuten.*

## **PRODUKTIONSINFORMATIONEN**

- Hergestellt in der Ukraine

## **REINIGUNG**

Die Nadeln sind so konfiguriert, dass ein optimaler, gesundheitsfördernder Reiz gesetzt wird, ohne dass die Haut beschädigt wird. Deshalb genügt es, den BLACKROLL® NEEDLEROLLER für den persönlichen Gebrauch mit Wasser, Seife und einer Bürste in regelmäßigen Abständen zu reinigen. Die speziell wegen ihrer stimulierenden Wirkung ausgewählten Metalle sind nicht rostfrei; trockne den BLACKROLL® NEEDLEROLLER deshalb mit einem handelsüblichen Föhn. Wenn du den NEEDLEROLLER in deiner therapeutischen Praxis nutzt, folge bitte dem Standard-Reinigungsprotokoll, achte aber darauf, chlorfreie Sterilisationsmittel zu verwenden. Der BLACKROLL® NEEDLEROLLER sollte zwischen 10 und 40 Grad Celsius und nicht zu feucht (Luftfeuchtigkeit unter 80%) gelagert werden. Vermeide die Lagerung unter direkter Sonneneinstrahlung.